

คู่มือการใช้งาน



กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้เครื่อง

เวอร์ชัน 4.2

อัปเดตล่าสุด 5 ธันวาคม 2568

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 คุณสมบัติและการใช้งาน

Mandala Scan คืออุปกรณ์ไปโอพีดีแบ็กขนาดกะทัดรัดที่ติดตามระดับความเครียดและความสมดุลของพลังงานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (HRV) ช่วยระบุความไม่สมดุลของอารมณ์และพลังงาน โดยให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีที่สุด

จับคู่กับแอป Mandala Scan ซึ่งให้คำแนะนำความถี่ส่วนตัวและการติดตามความสอดคล้อง เมื่อผสานเข้ากับแอปพลิเคชัน SoulSync iOS ที่จะส่งคำยืนยันและโปรแกรมย่อยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์และความชัดเจนทางจิตใจ

Mandala Scan ของคุณผ่านการทดสอบคุณภาพแล้ว และพร้อมที่จะสนับสนุนการเดินทางเพื่อสุขภาพของคุณทุกที่ ทุกเวลา

1.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- อุปกรณ์วัดสัญญาณชีพจร พร้อมบอกสถานะ 3 สถานะ
- ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
- ใช้เอาต์พุตเป็น LED RGB และอินพุตเป็น เซนเซอร์ตรวจวัดสัญญาณชีพจร
- รองรับ Bluetooth สำหรับควบคุมผ่านมือถือ

1.3 คำเตือนด้านความปลอดภัย

- ตรวจสอบอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเมื่อแกะกล่อง
- อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยทั้งหมดในคู่มือ
- ห้ามเปิดใช้งานใกล้น้ำหรือบริเวณเปียกชื้น
- ห้ามเปิดฝาเครื่องหากไม่ใช่ช่างผู้เชี่ยวชาญ
- หลีกเลี่ยงการวางใกล้แหล่งความร้อน เช่น เต้าไฟ
- ใช้แหล่งจ่ายไฟตามที่กำหนดในคู่มือเท่านั้น

1.4 การรับประกัน

- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สั่งซื้อ
- หากมีปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
- การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจาก
 - การใช้งานผิดวิธีหรือประมาทละเลย
 - การดัดแปลงหรือถอดประกอบเครื่องเอง
 - ค่าภาษีศุลกากรหรือค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่น ๆ
 - หากความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดวิธี ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่งเองทั้งหมด

1.5 ข้อควรระวังสำคัญ

- หากเครื่องชำรุดหรือเสียหาย ห้ามใช้งาน ควรติดต่อฝ่ายบริการ
- ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับประเทศที่คุณใช้งานก่อนเริ่มชาร์จ
- ควรชาร์จไฟครั้งแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง
- ห้ามถอดประกอบหรือดัดแปลงเครื่องเอง
- หลีกเลี่ยงน้ำ ความชื้น ความร้อนจัด และฝุ่นละออง

1.6 การดูแลรักษา

- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรชาร์จไฟอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
- ใช้ผ้านุ่มหรือสเปรย์ทำความสะอาดกระจกที่มีส่วนผสมของน้ำในการเช็ดทำความสะอาด
- ควรรักษาความสะอาดตัวเครื่องเสมอเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- เก็บในที่แห้ง หลีกเลี่ยงแสงแดดโดยตรง
- หากมีปัญหาให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

1.7 การเริ่มต้นใช้งาน

- หากต้องการเปิดเครื่อง กดปุ่ม 1 ครั้งเพื่อเปิดการทำงาน เครื่องจะเริ่มทำงานตามฟังก์ชันพื้นฐาน
- เชื่อมต่อกับมือถือผ่าน Bluetooth: MS-XXXX
- เลือกโปรแกรมสำหรับสแกนเนอร์ ที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน
- หากต้องการปิดเครื่อง กดปุ่ม 2 ครั้ง แบบดับเบิ้ล เครื่องจะหยุดทำงานทันที

1.8 การตั้งค่าพิเศษ

- ในแอปพลิเคชันจะมี Library หลักอยู่จำนวน 6 กลุ่มให้เลือกใช้งาน
- ในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชัน Coherence State เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่พิจารณาแบบ Real time
- ในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชัน Custom List เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สร้าง Library เฉพาะที่ต้องการได้
- ในแอปพลิเคชันจะมีฟังก์ชันที่สามารถตั้งค่าภาษาได้ทั้งหมด 11 ภาษา

1.9 ระบบการชาร์จของตัวเครื่อง

- เมื่อถอดสายชาร์จ - ใช้งานปกติ - ไฟ LED สีแดงจะค้าง หมายถึงระดับแบตเตอรี่ปกติ
- เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เพื่อแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ
- เมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ ไฟ LED สีแดงจะกะพริบ เพื่อแจ้งว่าอยู่ในระหว่างการชาร์จ
- เมื่อแบตเตอรี่เต็มแล้ว ไฟ LED สีแดงจะค้าง หมายถึงพร้อมใช้งาน

1.10 สิ่งที่มีรวมอยู่ในชุด

1. Mandala Scan
2. สายชาร์จ USB Type-C
3. เซ็นเซอร์หนีบหู สำหรับวัดสัญญาณชีพจร




2. Technical Data

2.1 Specifications


ชื่อสินค้า:	Mandala Scan
แรงดันใช้งาน:	5V DC
สีตัวเครื่อง:	ขาว
วัสดุ:	ABS + อะคริลิก
ช่องชาร์จ:	USB Type-C
แบตเตอรี่:	ลิเทียมโพลีเมอร์ 3.7 V/ 500 mA
โหมดทำงาน:	การตอบรับสถานะความสอดคล้อง
การเชื่อมต่อ:	Bluetooth 5.0
ขนาด:	70 x 75 x 25 มม.
น้ำหนัก:	800 กรัม

2.2 โครงสร้างเครื่อง

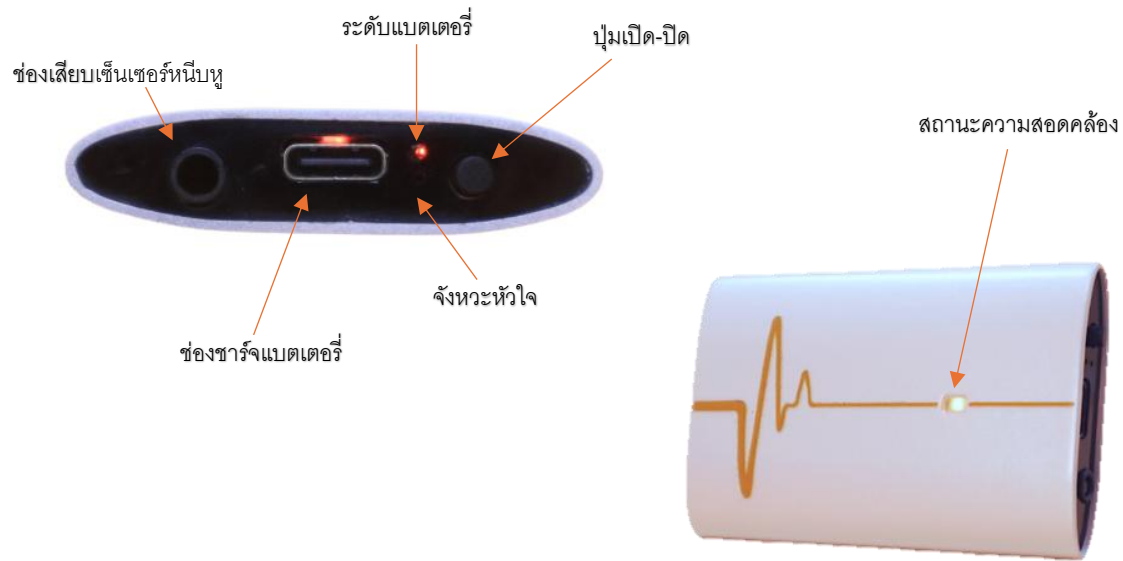

2.3 ติดตั้งการชาร์จแบตเตอรี่

1. เพื่อการชาร์จ เชื่อมต่อสาย USB-C กับตัวเครื่องและอะแดปเตอร์ แล้วเสียบช่องไฟฟ้า
2. การชาร์จจากแบตเตอรี่เปล่าใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง และใช้งานได้นานกว่า 4 ชั่วโมง (ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงได้)
3. ไฟสีแดงจะกะพริบขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ และจะหยุดเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว

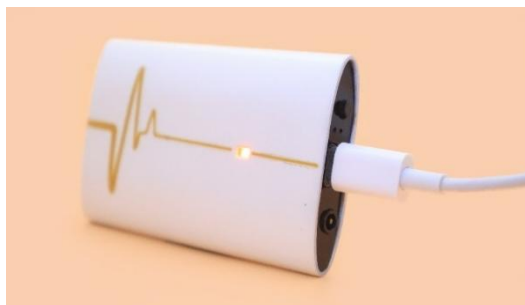


ข้อแนะนำ: หลีกเลี่ยงการชาร์จไฟค้างไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อยืดอายุแบตเตอรี่

3. แอปพลิเคชัน Mandala Scan (มีทั้งหมด 11 ภาษาให้เลือก)


3.1 การติดตั้งแอป

ดาวน์โหลดได้จาก App Store (iOS) หรือ Google Play Store (Android) สำหรับผู้ใช้งานในจีน ดาวน์โหลดได้ที่ <https://light-mandalas.com/downloads>

App Store (iOS)

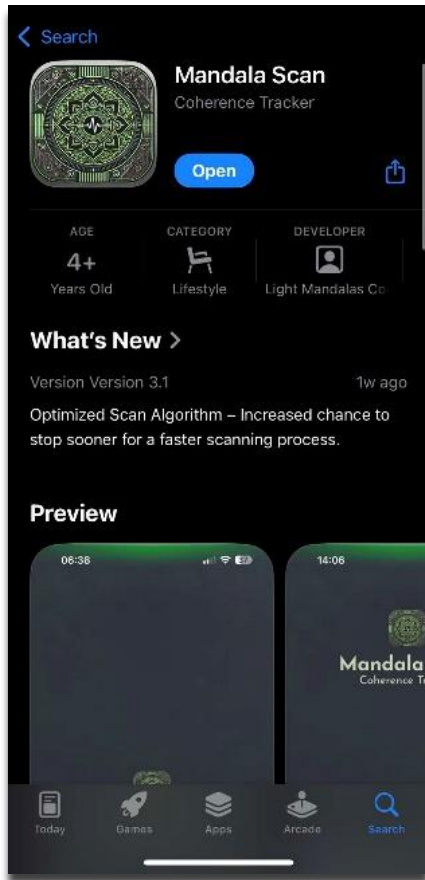


Play Store (Android)

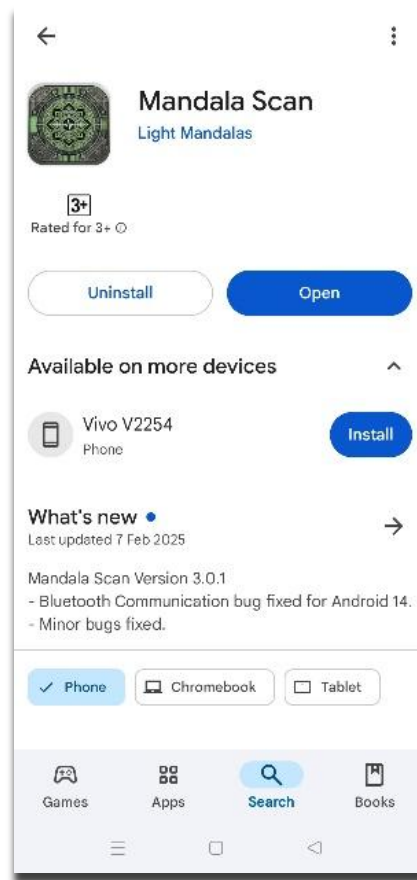


3.2 การเชื่อมต่อบลูทูธกับแอป

แตะไอคอน "Settings" ที่ด้านขวาล่าง จากนั้นเลือก "Setup Mandala Scan" แอปจะค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง เลือกหมายเลขซีเรียลที่แสดงเพื่อเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ

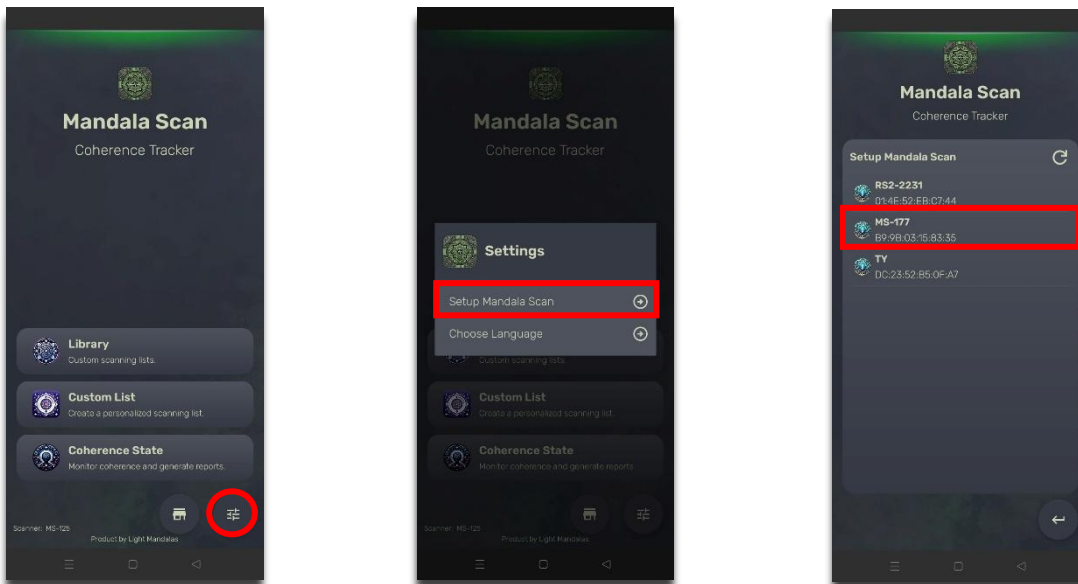


3.3 Library

เลือกหัวข้อและสแกนเพื่อค้นหาองค์ประกอบสำคัญที่ตัวคุณต้องการ

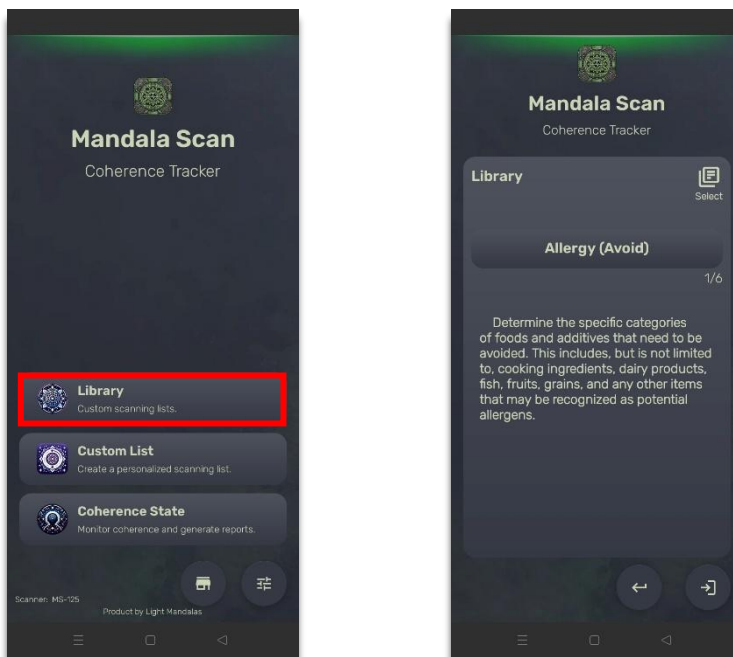

คลิกไอคอนนี้เพื่อดูว่าห้อง Library มีอะไรบ้าง

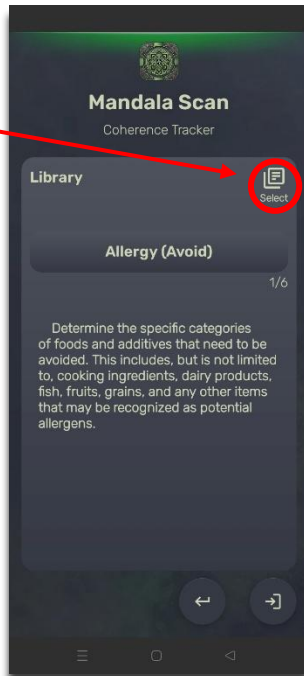



แตะไอคอน "Scan" เพื่อเริ่มวิเคราะห์ความต้องการของร่างกายของคุณ

ผู้ใช้สามารถส่งออกไฟล์เป็นรูปแบบ PDF และแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นได้

ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น แสดงว่าธาตุนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายของคุณมากขึ้น
เปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงความต้องการที่มากขึ้น
แต่ว่าในกรณีนี้ ในหมวดหมู่การแพ้ ผู้ใช้ควรเลี่ยงตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับ



3.4 Custom List

ปรับแต่งและสร้างห้องสมุดของคุณเองโดยการเพิ่มชื่อรายการและคำอธิบาย

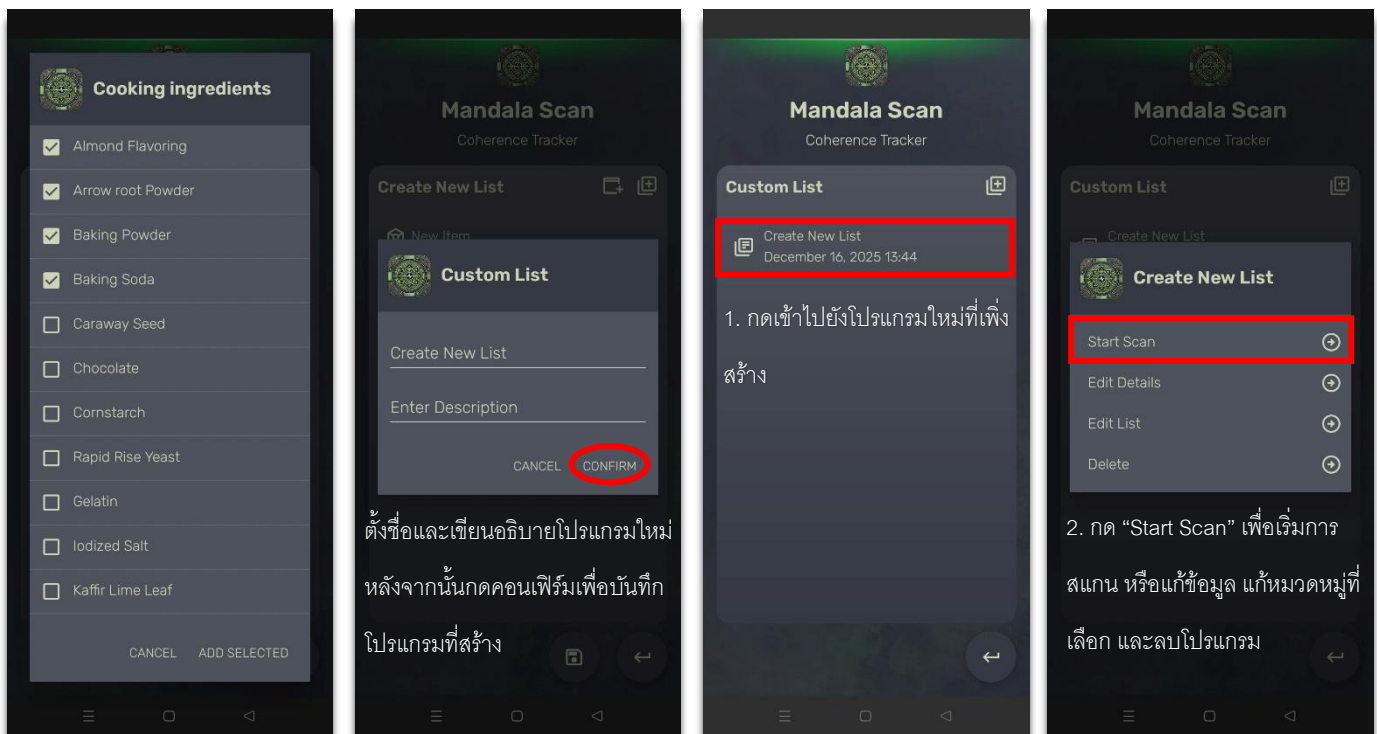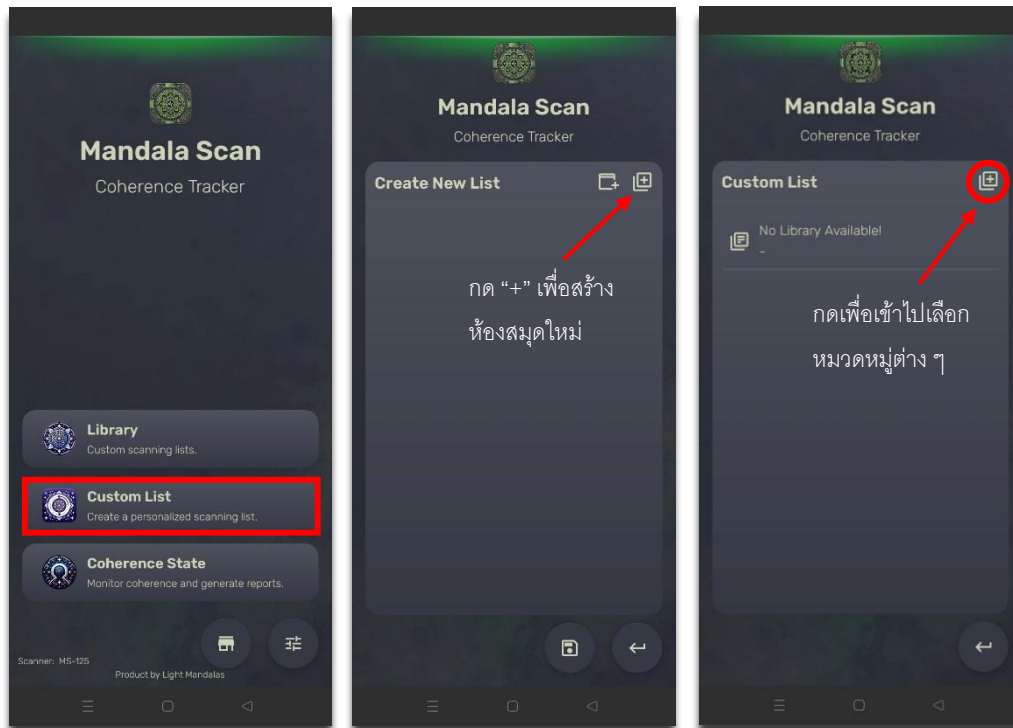

3.5 Coherence State

ตรวจสอบสถานะและความสอดคล้องของจิตใจคุณ

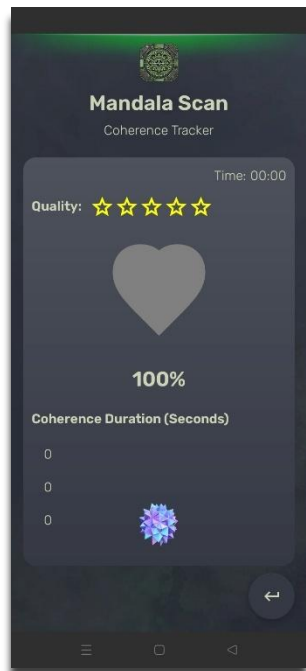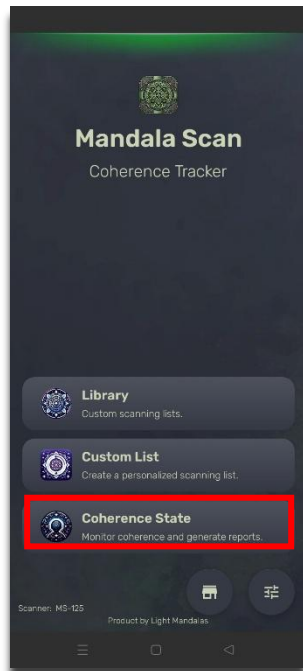

- Red – สีแดง – ความเครียดสูง ความยึดหยุ่นต่ำ
- Blue – อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลง กำลังผ่านการปรับปรุงสมดุล
- Green – สถานะและไฟกัสของความสอดคล้องที่เหมาะสมที่สุด

Disclaimer

ผลิตภัณฑ์ Light Mandalas ได้รับการออกแบบมาเป็นเครื่องมือเสริมพลังงานสำหรับการผ่อนคลาย จัดการความเครียด และความเป็นอยู่ที่ดี ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และไม่สามารถทดแทน การรักษาหรือคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญได้

ประสบการณ์หรือคำรับรองใดๆ ที่แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นสะท้อนถึงการตอบสนอง ของแต่ละบุคคล และไม่รับประกันผลลัพธ์ เนื่องจากพลังงานและสภาวะอารมณ์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ใช้จึงอาจพบผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกไวต่อสิ่งเร้าหรือรู้สึกไม่สบายมากขึ้น การใช้ผลิตภัณฑ์ของ เรา คุณรับทราบว่าผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

บริษัท Light Mandalas จำกัด (ประเทศไทย) จะไม่รับผิดชอบต่อผลข้างเคียงที่ไม่ได้มีเจตนา ความรู้สึกไม่สบาย หรืออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากคุณมีข้อสงสัยทางการแพทย์ โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

หากมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

Light Mandalas Co., Ltd. (Thailand Headquarters):

- เว็บไซต์: www.light-mandalas.com
- อีเมล: info@light-mandalas.com
- Instagram: [@mandalawave9](https://www.instagram.com/mandalawave9)
- YouTube Channel: Light Mandalas Official
- TikTok: Light Mandalas
- WeChat: Light Mandalas 光之曼陀罗
- ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค: cservice@light-mandalas.com